

新型コロナウイルス PCR 検査キット

PCR検査を
ご自宅で

最短当日に検査結果
をお知らせ



PCR 検査をもっと身近に！

感染リスクから「病院に行きたくない」「検査キットは精度が不安」などの理由から「検査したくてもできない」という人たちに、身近で気軽に検査を受けられるキットを販売しております。最短即日で結果を通知します。ビジネスシーンや日常を安心してお過ごしいただくためにご活用ください。

✔ 厚生労働省が定める検査方法

厚生労働省で承認された試薬を用いて検査します。
登録衛生検査所で高精度の検査結果を提供しております。

✔ 陰性証明の発行が可能

医療機関からの陰性証明書の発行が可能です。
※オプションとなり別途費用が必要です。

PCR 検査キット内容物
唾液（検体）採取キット、郵送用封筒（切手不要）、
検査申込書（同意書）、取扱説明書

検査は簡単！唾液を送るだけ！

薬局店舗で購入、またはホームページよりご購入が可能です。
ネット注文の場合は最短翌営業日に検査キットを発送いたします。



Step1. 唾液を採取

検査キットの手順に従い同封の専用容器に唾液を採取してください。痛みのない検査方法です。



Step2. 検体を郵送

同封の専用封筒で検査センターへ郵送してください。
センターに到着次第、検査を実施します。



Step3. 結果をお知らせ

検査後、メールか郵送で検査結果をお知らせします。
最短当日で検査結果のお知らせが可能です。
※ 検体数によっては翌日以降のお知らせとなります。

湊町衛生検査センター



〒790-0012 愛媛県松山市湊町3丁目1-9
マツゲキアトリウム 1-D
<https://minatomachi-hic.jp>



商品についてのご質問、ご相談はこちら

089-915-7110



ホームページからのご購入も可能です

ご使用方法(唾液採取手順)



唾液を採取する30分前に、うがいなどで、口内を水で洗浄し清潔に保ってください。
口内洗浄後の飲食、チューインガムなどの摂取は止めてください。

キット内容




バイアル上フタ
保存液容器
取り扱い説明書・
バーコード・Sample Bag
バイアルキャップ
コレクションバイアル




※保存液容器

保存液容器フタは取り外さないようにしてください。

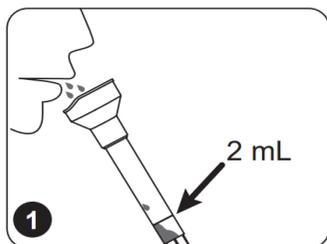


① バイアルに記載の
2 mL赤線まで唾液を採取する。
(唾液泡を含まずに2 mLの赤線まで
採取)

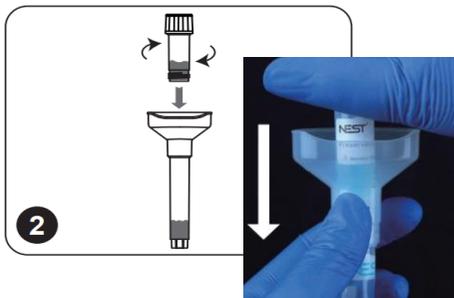

② 唾液採取後に付属の
保存液容器を取り出します。
保存液容器のフタを上部に
唾液採取キットへ右回りに
回し取り付けます。
自動的に底面が破れ、
保存液がバイアルチューブ
へ入ります。


※上手く底面が破れない場合は一度、
緩めてから、再度回すと破れます。

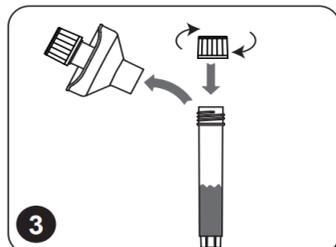


③ 保存液がすべてバイアルチューブ
に移ったのを確認し、唾液採取に
使用したバイアル上フタを取り外し
ます。

その後、付属のバイアルキャップを
付けてください。

※バイアルキャップは幼児の誤飲
などご注意ください。

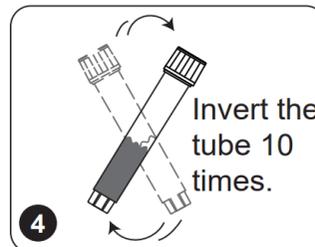

④ フタをしっかりと閉めたの
ちに、
左右にバイアルを10回ほど
振って混合してください。

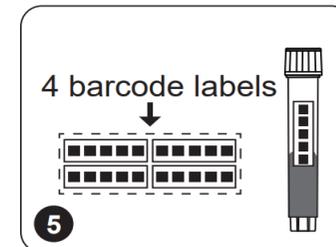

⑤ 4枚のバーコードラベルのうち、**1枚をバイアルチューブへ貼り付け**、
2枚は付属の申込み書へ貼り付け
てください。
残りの1枚はユーザー様に保管いた
だき、結果のフィードバック時にご使
用ください。