

# 新型コロナウイルス PCR検査

## 唾液採取用検査キット

希望小売価格

# 3,800円(税別)

## ご自宅で 簡単・手軽

※唾液を採取するだけの簡単な検査です。

## 唾液採取後 キットを郵送

**送料無料** ※返信用封筒付  
(料金受取人払郵便)

自費検査

品名：新型コロナウイルス  
PCR検査 唾液採取用検査キット

### ■PCR検査キット内容物

- ・唾液(検体)採取キット
- ・唾液コレクター
- ・唾液収集用チューブ
- ・キャップ
- ・返信用封筒付  
(料金受取人払郵便)
- ・نانパリングシール
- ・説明書
- ・申込書

検査名：新型コロナウイルスPCR検査

検査種類：核酸増幅法(RT-PCR法)

検査手段：郵送

対象地域：全国対応可能

結果通知までの期間：唾液採取検査キット  
到着後、最長3時間

返送方法：同封の返信用封筒でご返送ください。

使用期限：製造から1年

MADE IN CHINA

〈パッケージサイズ〉H166×W220×D40mm

〈入数〉アウター20個入

〈型番〉TOAMIT-PCR-K1

〈JAN〉4562441908810

詳しくは  
弊社ホームページを  
ご参照ください。  
※ご予約は不要です。



東亜産業 新型コロナ  
PCR検査センター

大切な家族や自分を守るため、気になったらすぐに検査を！

SARS-CoV-2

# 新型コロナウイルス PCR検査

## 唾液採取用検査キット

## ご自宅で 簡単・手軽

※唾液を採取するだけの簡単な検査です。  
詳細については同様の説明書をご覧ください。

## 唾液採取後 キットを郵送

**送料無料** ※返信用封筒付  
(料金受取人払郵便)

ご返送いただいたキットを弊社受領後、

**最短3時間後** 検査状況※をメールで通知  
(ご指定のメールアドレス/LINE/SMSにて)

※唾液検体につき、新型コロナウイルスに特徴的なRNAが検出されるかの、  
検査状況を(高リスク/低リスク)にてご報告いたします。  
※感染の有無については専門の病院又は最寄りの保健所にご相談ください。

自費検査

ご返送いただいたキットを弊社受領後、

**最短3時間後** 検査状況※をメールで通知  
(ご指定のメールアドレス/LINE/SMSにて)

※唾液検体につき、新型コロナウイルスに特徴的なRNAが検出されるかの、検査状況を(高リスク/低リスク)にてご報告いたします。  
※感染の有無については専門の病院又は最寄りの保健所にご相談ください。

画像はイメージです。一部仕様変更になる場合がございます。

【ご注意事項】●当サービスでお知らせする検査通知から推測できるのは「ご提供いただいた唾液から取り出した検体の中に、新型コロナウイルスが存在するかどうか」についてのみです。また、PCR検査の特性として、一定確率で、検体にウイルスが存在したとしても存在しない状態を示したり、逆に検体にウイルスが存在しなかったとしても存在する状態を示したりする場合があります。仮に、高リスク(唾液の中に新型コロナウイルスが存在することを示すような検査状況)であると通知されたとしても、新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか等については、判断できませんので、お住まいの地域の保健所にご相談ください。●発熱等の症状がある方、濃厚接触者またはその疑いがある方は検査の対象外です。●採取前は、最低1時間は飲食、喫煙、うがい、歯磨きをしないでください。●消化酵素により、感度が低下する場合があります。また、マウスウォッシュ、のどあめ、のどスプレー、ガム、歯磨き粉には、殺菌作用のあるCPC(塩化セチルピリジニウム)が含まれているものがあり、正しく検査ができない可能性があります。●当PCR検査は唾液を採取して検査を行うものです。より正確に検査を行うため、採取した唾液は採取後、速やかにお送りください。●唾液は無理に出さず、自然に少しずつ出してください。●唾液採取からご返送までに時間が空いてしまう場合は、発送直前まで冷蔵庫等で冷蔵保存をお願いします。●引火の恐れがありますので、チューブなどを火に近づけないでください。●直射日光や高温多湿の場所、炎天下の車内等に保管しないでください。●水に濡らしたり湿気の多い場所、火気のそばで使用しないでください。●検査キットはお子様やペットの手の届かない所で、使用・保管してください。●保存液が目に入ったり、肌に触れたりした場合にはすぐに水で十分に洗い流し、異常がある場合には専門医に相談してください。●小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。●小さいお子様が誤飲するおそれがあります。万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受けてください。

国内検査センター | 東亜産業 PCR総合検査センター 〒819-1190 福岡県福岡市西区徳永1088-12



【ご用命・お問い合わせ先】

株式会社HNC

大阪市中央区本町1-6-18

TEL: 06-4705-6388 FAX: 0725-23-2864

E-mail: nomura@hnc.bz



## ご注意事項

- 当サービスでお知らせする検査通知から推測できるのは

「ご提供いただいた唾液から取り出した検体の中に、新型コロナウイルスが存在するかどうか」についてのみです。

また、PCR検査の特性として、一定確率で、検体にウイルスが存在したとしても存在しない状態を示したり、逆に検体にウイルスが存在しなかったとしても存在する状態を示したりする場合があります。

仮に、高リスク（唾液の中に新型コロナウイルスが存在するようなことを示すような検査状況）であると通知されたとしても、新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか等については判断できませんので、お住まいの地域の保健所にご相談くださいますようお願いいたします。

- 発熱等の症状がある方、濃厚接触者またはその疑いがある方は**検査の対象外**です。
- 採取前は最低1時間は飲食、喫煙、うがい、歯磨きはしないでください。
- 消化酵素により、感度が低下する場合があります。また、マウスウォッシュ、のどあめ、のどスプレー、ガム、歯磨き粉には、殺菌作用のあるCPC（演歌セチルピリジニウム）が含まれているものがあり、正しく検査が出来ない可能性があります。
- 当PCR検査は唾液を採取して検査を行うものです。より正確に検査を行うため、採取した唾液は採取後、速やかにお送りください。
- 唾液は無理に出さずに、自然に少しずつ出してください。
- 唾液採取から発送までに少し時間が空いてしまう場合は発送直前まで冷蔵庫などで冷蔵保存をお願いします。
- 引火の恐れがありますので、チューブなどを火に近づけないでください。
- 直射日光や高温多湿の場所、炎天下の車内等に保管しないでください。
- 水に濡らしたり湿気の多い場所、下記のそばで使用しないでください。
- 検査キットはお子様やペットの手の届かないところで、使用・保管してください。
- 保存液が目に入ったり、肌に触れたりした場合は、直ぐに水で十分に洗い流し、以上がある場合には専門医に相談してください。
- 小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。
- 小さいお子様が誤飲するおそれがあります。万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
- 外装ごみ資源を分別する際には、各自治体の区分に従ってください。

<販売取扱会社>

株式会社 HNC

〒595-0039 泉大津市楠町東2番32号

TEL 0725-23-2864

URL:<http://hnc.bz/>

お問合せ: [info@hnc.bz](mailto:info@hnc.bz)

E-mail: [nomura@hnc.bz](mailto:nomura@hnc.bz)

